



**maisense**  
**FREESCAN**

## 快速入门指南

产品名称: 智能护心仪专业版 (211131)  
型号: Freescan


线上教学




131-MS020-0003

www.maisense.com  
support@maisense.com

## FREESCAN® 前视图

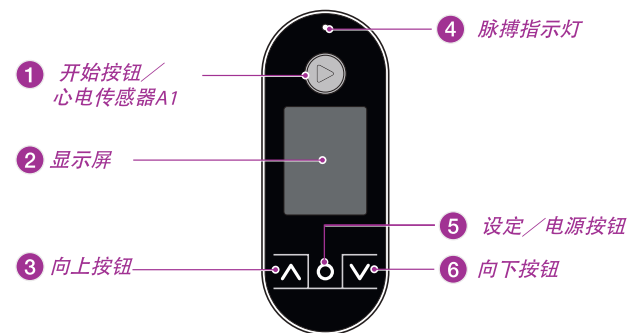

## FREESCAN® 后视图

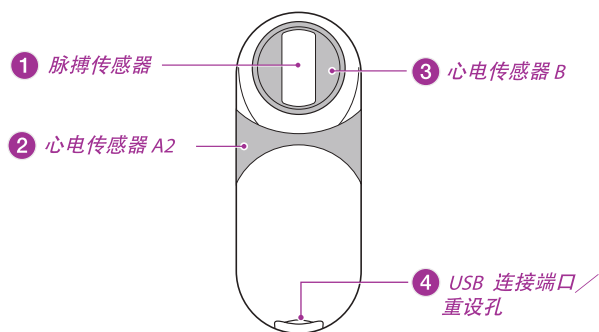


## 1 开启电源




## 1 初始设定

使用向上 / 向下及设置按钮输入您的语言、目前时间及个人资料。

**!** 输入资料会影响测量准确度。

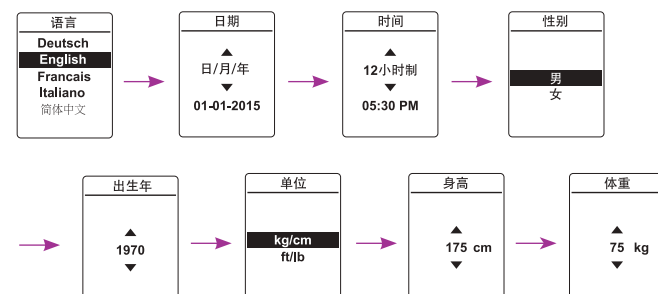


## 2 测量姿势

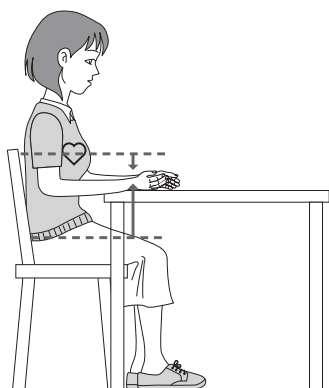

请坐下。将双手放在桌上，并放松肩膀。

测量时，左手腕置于心脏与腿部之间。


## 3 确认脉搏位置

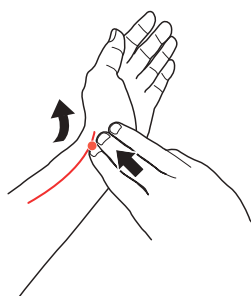

自然向外弯曲左手掌。

右手手指沿着左手腕桡动脉(红线)寻找脉搏。


## 4 手指位置

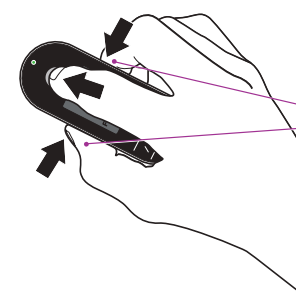

以右手手指握住 FREESCAN®

右手拇指及中指必须维持接触心电传感器 A2 的两端。

## 5 开始测量

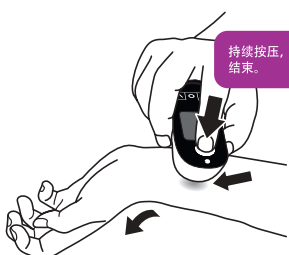

持续按压，直到测量结束。

自然向外弯曲左手掌。

将脉搏传感器置于左手腕的脉搏位置上方。

以适当力道按住 开始按钮 使脉搏传感器压在脉搏上。

## 6 量测时观察脉搏指示灯




检测到您的脉搏后，脉搏指示灯会按照与您心律相同的频率闪烁。

观察脉搏指示灯，直到听见提示音。

测量约需 10 秒。


## 7 测量结果

若您看见此屏幕，表示测量成功。您可从屏幕上读取血压值。

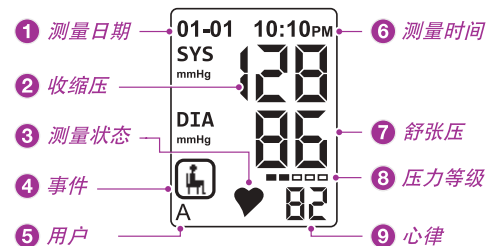

## 脉搏指示灯没有闪烁？

⚠️ 如果您将脉搏传感器放在脉搏位置上约 5 秒，但是脉搏指示灯没有闪烁，请尝试以下操作：

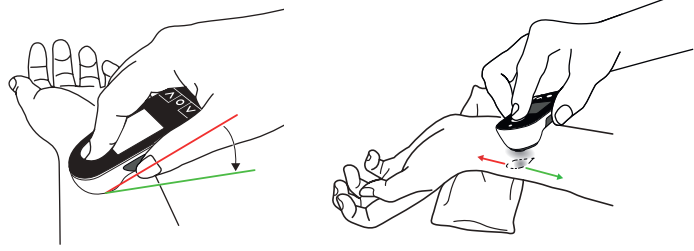

调整测量力度或角度，直到脉搏指示灯开始闪烁，每次按住 5 秒。

在脉搏位置沿着上图显示的方向移动 FREESCAN<sup>®</sup>，每次按住 5 秒。




蓝牙连线

上传记录至应用程序前，请确保应用程序已正确安装，并确保智能手机上已开启蓝牙功能。

请参考使用说明及应用程序卡以取得更多资讯。

## 切换用户

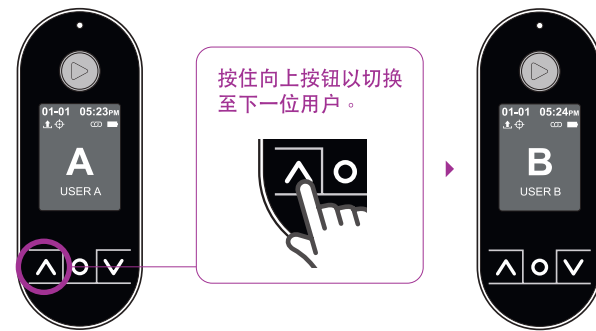

按住向上按钮以切换至下一位用户。

## 错误讯息 E04



E04

无心电讯号

若看见脉搏指示灯亮起橘灯，表示测量失败。

1. 请使用湿纸巾湿润手腕及指尖。
2. 请擦去电极上的油脂。

按下「开始」按钮再次测量。

## 错误讯息 E05



E05

脉搏太弱

若看见脉搏指示灯亮起橘灯，表示测量失败。

请确认测量姿势（步骤[2]）、脉搏位置（步骤[3]）以及[脉搏指示灯没有闪烁?]部分。

按下「开始」按钮再次测量。

## 错误讯息 E07



E07

讯号干扰

若看见脉搏指示灯亮起橘灯，表示测量失败。

请远离电脑萤幕等无线电波源至少一公尺远。

按下「开始」按钮再次测量。

⚠️ 如果 E05 讯息仍出现，请休息 5 分钟，稍后再尝试进行测量。





⚠️ 如果 E07 讯息重复出现，请联系经销商获取帮助。

## 校准说明








可使用另一台经认证的血压监测器为 FREESCAN<sup>®</sup> 进行校准，以确保其准确度。

请于首次使用前、剧烈体重变化后、手术后或重大疾病后进行 FREESCAN<sup>®</sup> 校准，并于之后每 3 个月校准一次。

第 2 回

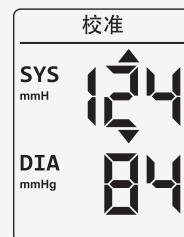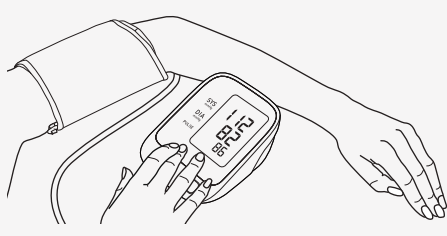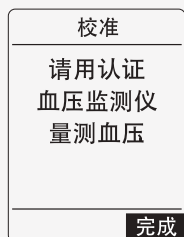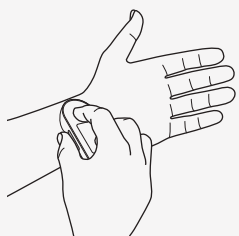

调整为

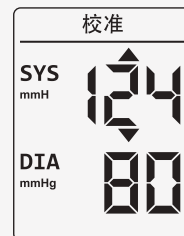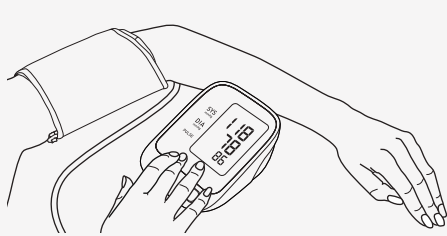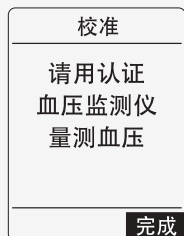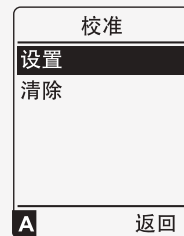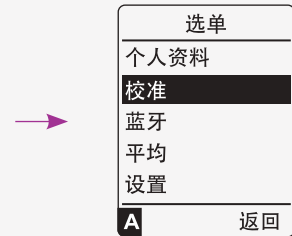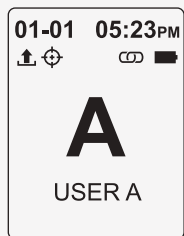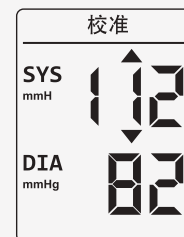

调整为

